

Płyn wielofunkcyjny Bausch & Lomb ReNu[®] MPS[™] Multi-Purpose Solution

Ta ulotka zawiera ważne informacje. Przeczytaj uważnie i zachowaj na przyszłość.

Płyn wielofunkcyjny Bausch & Lomb ReNu[®] MPS[™] Multi-Purpose Solution jest aseptycznym, buforowanym, izotonicznym płynem. Służy do codziennego użytku, dezynfekcji, nawilżania, płukania i przechowywania wszystkich rodzajów miękkich soczewek kontaktowych.

SKŁAD

Sterylny płyn zawierający kwas borowy, sól dwusodową kwasu etylenodwuaminoczworoocowego, boran sodu i chlorek sodu; DYMED[®] (biguanid poliaminopropylu) 0.00005%, poloksaminę 1%. NIE ZAWIERA SKŁADNIKÓW TAKICH JAK: CHLORHEKSYDYNA ANI THIMEROSAL.

SPOSÓB UŻYCIA:

Zawsze myj i płucz ręce zanim dotkniesz soczewek. By dokładnie zdezynfekować soczewki, muszą one być dokładnie wyczyszczone, opłukane i odpowiednio długo przechowywane w płynie po każdorazowym ich zdjęciu z oczu.

Aby dokładnie wyczyścić i zdezynfekować Twoje soczewki musisz przestrzegać wszystkich kroków za każdym razem jak wyjmiesz soczewki z oczu.

Krok 1: Nanieś przynajmniej 3 krople płynu ReNu MPS Multi-Purpose Solution na każdą soczewkę z obu stron i pocieraj delikatnie przez 20 sekund z każdej strony. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowego płynu do codziennej pielęgnacji.

Krok 2: Usuń wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni soczewek płucz je dokładnie płynem ReNu MPS Multi-Purpose Solution.

Krok 3: Oczyszczone soczewki umieść w pojemniku na soczewki napełnionym świeżą porcją płynu wielofunkcyjnego ReNu MPS Multi-Purpose Solution.

SOCZEWKI POWINNY BYĆ ZANURZONE W PŁYNIE, PRZEZ CO NAJMNIEJ CZTERY GODZINY LUB CAŁĄ NOC.

Możesz przechowywać soczewki w zamkniętym pojemniczku maksymalnie przez okres 30 dni.

Wyjmij soczewki z pojemnika na soczewki i włóż do oczu. Po każdorazowym użyciu wylej płyn ReNu[®] MPS[™] Multi-Purpose Solution. Przy użyciu świeżego płynu ReNu[®] MPS[™] Multi-Purpose Solution wypłucz pojemnik i pozwól samoistnie wyschnąć.

ODBIĄCZANIE: Niektórym pacjentom może być zalecane usuwanie osadów białkowych przy pomocy środka enzymatycznego. W tym celu należy się skontaktować ze swoim specjalistą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przestrzegaj zaleceń Twojego specjalisty odnośnie dbania o Twoje soczewki. Zaniedbanie tych zaleceń może spowodować rozwój poważnych infekcji oka.
- Po każdym użyciu wylej z pojemniczka na soczewki płyn BAUSCH & LOMB ReNu[®] MPS[™] Multi-Purpose Solution.
- Nie dotykaj końcówką butelki żadnej powierzchni ani nie dotykaj oka, gdyż może to zanieczyścić płyn lub spowodować zranienie oka.
- Zakręcaj butelkę by uniknąć zanieczyszczenia lub wyparowania płynu.
- Nie stosuj płynu BAUSCH & LOMB ReNu[®] MPS[™] Multi-Purpose Solution do dezynfekcji na gorąco (termicznej).
- Pozbądź się płynu po upływie 6 miesięcy od jego otwarcia.
- Nie używaj płynu po upływie daty ważności.
- Nie używaj, bez nadzoru specjalisty, żadnych medykamentów do oczu razem z płynem od soczewek.
- Trzymaj płyn w miejscu niedostępnym dla dzieci.

WAŻNE

W przypadku wystąpienia podrażnień, ich przeciągania się i narastania, należy zaprzestać używania i natychmiast skontaktować się ze specjalistą.




Bausch & Lomb Incorporated,
Rochester, NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated, 106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

CE 0050

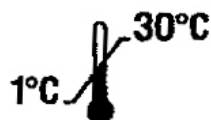

Made in Italy